

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO / AGUJAS DE INYECCIÓN / DROPSAFE

AGUJAS DE SEGURIDAD PARA  
DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN  
USO PROFESIONAL

A. MENARINI DIAGNOSTICS



## DROPSAFE

Agujas de seguridad desechables, estériles, diseñadas para ser utilizadas con un dispositivo de inyección para la administración de fármacos, entre ellos la insulina. Para uso del profesional sanitario

**Presentación:** Caja de 100 unidades  
**Código:** 49.503  
**Diametro aguja:** 31 G (0,25 mm)  
**Longitud aguja:** 6 mm

**Presentación:** Caja de 100 unidades  
**Código:** 49.504  
**Diametro aguja:** 31 G (0,25 mm)  
**Longitud aguja:** 8 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE

La aguja se encuentra protegida detrás de una cubierta para evitar exposición accidental

**Confirmación visual de bloqueo**  
La franja roja aparece cuando la aguja está bloqueada

• Aguja recubierta de **Droplicon™**: método especial y único de lubricación, para garantizar una inyección más suave y menos dolorosa

• Bloqueo automático de la aguja después del uso

**Otras características:** Tecnología de pared fina (Thin Wall) para asegurar un flujo preciso de insulina

**Compatibilidad:** Compatibles con la mayoría de plumas de inyección disponibles en el mercado (según ISO 11608-2)

**Látex:** No contienen látex

**Esterilización:** Esterilizadas por Radiación Gamma



Antes de su utilización



Después de su utilización


## MODO DE USO



**Paso 1:**  
Retire la lengüeta protectora.  
Use otra aguja si falta o está  
dañada.



**Paso 2:**  
Introduzca la aguja de  
seguridad en la pluma  
manteniéndola en el mismo  
eje que ésta última. Ajuste  
girando sin forzar

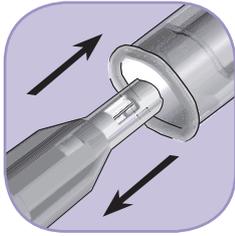

**Paso 3:**  
Retire el tapón  
protector exterior




**Paso 4:**  
Compruebe que la aguja es  
visible por el visor



**Paso 5:**  
Realice una prueba de  
cebado, si lo recomienda el  
fabricante de la pluma. Debe  
aparecer una gota de líquido  
en la punta de la aguja visible  
a través del visor



**Paso 6:**  
Ajuste la dosis prescrita

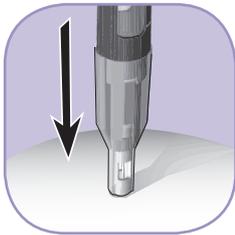

**Paso 7:**  
Inserte la aguja en la piel plana  
a un ángulo de 90° en un solo  
movimiento continuo hasta  
que la cubierta deslizante se  
detenga. Efectúe la inyección



**Paso 8:**  
Cuando se haya administrado  
toda la dosis, retire la aguja  
de la piel. La cubierta  
protectora deslizante cubrirá  
automáticamente la aguja  
hasta que se bloquee



**Paso 9:**  
Retire la aguja de la pluma



**Paso 10:**  
Deseche la aguja de  
seguridad usada en un  
recipiente para elementos  
punzantes

## Requisitos Legales

Directiva 93/42/CE y en sus posteriores modificaciones. Real Decreto 1591/2009 para Productos Sanitarios. Clasificación IIa.