

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO / PUNCIÓN PROFESIONAL / MENALANCET® PRO 23G

LANCETAS DE BIOSEGURIDAD ESTÉRILES  
DESECHABLES. USO PROFESIONAL

A. MENARINI DIAGNOSTICS

**MenaLancet®**Pro



## MENALANCET® PRO 23G

Lancetas de bioseguridad estériles desechables

**Calibre:** 23 G (0,57mm)  
**Profundidad de punción:** 2,0 mm  
**Media de volumen de muestra obtenida:** Aprox. 20-50 µL

**Presentación:** Caja que contiene 200 dispositivos de punción  
**Código:** 42122  
**Temperatura de almacenamiento:** Temperatura ambiente. De 1 a 30°C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MENALANCET PRO® 23G

**Diseño:** Lanceta y pinchador integrados en un solo dispositivo  
Diseño ergonómico, que permite la sujeción y activación del dispositivo con una sola mano  
Botón de activación superior:  
Menor fuerza requerida para activar el dispositivo  
Menor sensación de dolor para el paciente  
Aguja con punta siliconada y bisel a tres caras, para conseguir el máximo confort en la punción

**Látex:** El producto NO contiene látex  
**Esterilización:** La aguja está esterilizada con radiación Gamma y protegida por un capuchón hasta el momento de la punción

**Usos indicados:** Análisis de glucosa  
Hemoglobina  
Colesterol  
Grupo sanguíneo  
Gasometría

**Tipos de pacientes:** Adultos  
Geriatría

**Composición:** Aguja: acero inoxidable 304  
Cuerpo de la lanceta: polipropileno y poliestireno

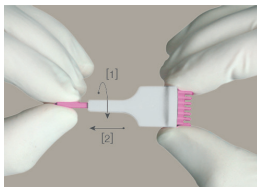
**BIOSEGURIDAD****Punción profesional sin riesgo para el usuario:**

**Monouso:** El dispositivo es monouso, totalmente desechable una vez realizada la punción

**No recargable:** No es posible recargar el dispositivo para una reutilización

**Sistema retracción de aguja:** Una vez realizada la punción, la aguja queda en el interior del dispositivo para evitar cualquier punción accidental

**Seguro:** Incorpora un sistema que evita la activación involuntaria del dispositivo

**MODO DE USO****Punción sencilla en sólo 2 pasos:**

**Paso 1:** Gire la tapa protectora de la lanceta y retírela.



**Paso 2:** Coloque la lanceta en la zona de punción y presione el botón a fin de activar el dispositivo

**Requisitos Legales**

Directiva 93/42/CE y 2007/47/EC para Productos Sanitarios. Real Decreto 1591/2009 para Productos Sanitarios. Clasificación IIa