

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO / PUNCIÓN DIABETES / GLUCOJECT® LANCETS PLUS

LANCETA ULTRAFINA
PARA PUNCIÓN CAPILAR
USO DEL PACIENTE

A. MENARINI DIAGNOSTICS

Glucoject®
Lancets **PLUS**
33G



GLUCOJECT® LANCETS PLUS

Lanceta ultrafina para punción capilar


Presentaciones:	Caja de 50 lancetas	Caja de 200 lancetas
Código:	48.339	48.340
CN:	358457.9	358473.9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GLUCOJECT® LANCETS PLUS


Diseño:	Lanceta metálica recubierta de plástico con capuchón protector Aguja ultrafina y biselada a tres caras, con punta siliconada para un mayor confort en la punción Universal: compatible con la mayoría de pinchadores del mercado	Esterilización:	La aguja está esterilizada con radiación Gamma y protegida por un capuchón hasta el momento de la punción
Composición:	Aguja: acero inoxidable	Látex:	El producto NO contiene látex
Calibre:	Cuerpo de la lanceta: Polietileno 33 G	Temperatura de almacenamiento:	Temperatura ambiente: 1°C-30°C

USOS INDICADOS Y TIPOS DE PACIENTES


Usos indicados:	Control de glucemia capilar Se recomienda su utilización con el pinchador Glucoject® Dual PLUS
------------------------	---

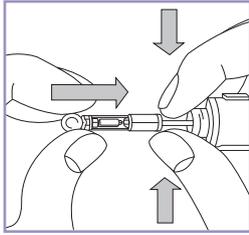MODO DE USO**Punción sencilla
en sólo 3 pasos:**

Paso 1:
Introducir la lanceta en
el pinchador

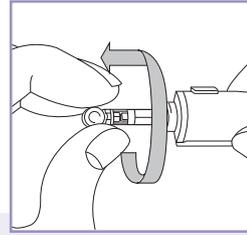

Paso 2:
Retirar el capuchón
protector
desenroscándolo y
separándolo del cuerpo
de la lanceta

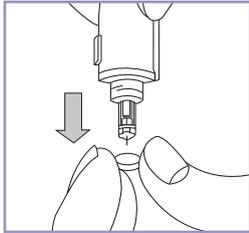

Paso 3:
Volver a colocar el
capuchón para desechar
la lanceta de forma
segura.

Requisitos Legales

Directiva 93/42/CE y 2007/47/EC para Productos Sanitarios. Real Decreto 1591/2009 para Productos Sanitarios. Clasificación IIa.