

Guía de Inicio



Para realizar un análisis de **glucosa** necesitarás las tiras reactivas **GlucoMen® areo Sensor** y, para los cuerpos cetónicos, las tiras **GlucoMen® areo β-Ketone**.
La técnica a seguir en ambos casos es:



1

Lavar y secar correctamente las manos



2

Introducir la tira reactiva hasta oír la señal

Tira reactiva glucosa

beep!

Tira reactiva cuerpos cetónicos



y visualizar el símbolo de la gota de sangre




3

Masajear y realizar la punción en un lateral

4

Acercar la tira reactiva a la gota de sangre para que la absorba

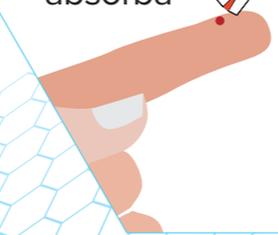

beep!



5

Leer el resultado en la pantalla con la tira hacia arriba

beep!

6



beep!

Expulsar la tira de forma segura

¿Qué puedes hacer con el medidor GlucoMen® areo 2K?

- Realizar un **análisis de glucosa o cuerpos cetónicos**
- Revisar las **memorias**
- Visualizar el **promedio** de glucosa
- Seleccionar los **marcadores**
- Activar o desactivar la **señal acústica** o pitido
- Establecer **alarmas y alertas**
- Accionar la **conectividad inalámbrica NFC**

Medidor inteligente de glucosa y cuerpos cetónicos
CONECTIVIDAD INTEGRADA



Los botones sirven para:

- Acceder a:**
- **Memorias**
 - **Promedios**
 - **Confirmar una selección**




Entrar en el modo **configuración*** presionando simultáneamente ambos botones

Medidor inteligente de glucosa y cuerpos cetónicos
CONECTIVIDAD INTEGRADA



- Desplazarse por:**
- **Memorias**
 - **Promedios**
 - **Y diferentes menús de configuración**

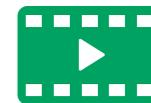

CON SOPORTE DIGITAL
Breves vídeos tutoriales



TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
900 301334

YouTube Soluciones para la Diabetes
@Soluciondiabete

* Para más información consulte el manual de usuario