











Software de gestión y análisis de datos para gestionar datos de productos de las líneas GlucoMen® Day y GlucoMen® areo.

GlucoLog Web es un software web, con datos intercambiados a través de la nube en tiempo real.

Los datos del usuario pueden compartirse con médicos y cuidadores.

### Registrarse en GlucoLog web

- 🔑 Seleccionar idioma.
- Escoger la opción "Crea una nueva cuenta"
- Seleccionar el acceso como Médico / Asistente / Centro o Paciente.
- Ingresar datos de acceso y confirmar el registro.





**Gluco**Log Bridge

### Opciones de descarga de datos

- Descargar los resultados del medidor mediante la aplicación GlucoLog Lite por conexión NFC.
- Descargar los resultados del medidor a través de GlucoLog Bridge por conexión por cable USB.



# Descarga de resultados mediante ))) Glucolog Lite





- Completar los datos de usuario al registrarnos en la App por primera vez .
- Abrir la pestaña "Configuraciones" y buscar el apartado "Mediciones".
- Campo "Meter": introducir modelo de glucómetro del que se recibirán datos.
- Campo "Medidor de glucosa": introducir en la primera casilla el número de serie (en la etiqueta de la parte trasera del medidor) y en la segunda el tipo de tecnología (NFC o Bluetooth).
- Encender en nuestro medidor la tecnología indicada e ir a la pestaña "Recepción".
- Apretar el botón "Recibir resultados" si es NFC y acercar el medidor al teléfono.




Puede descargar la App en:







## + Vincular dispositivos

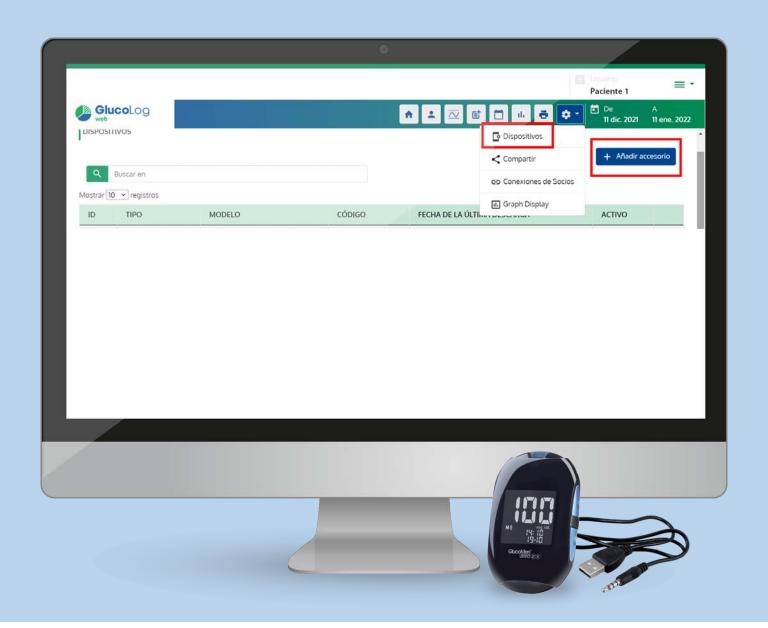


### Vincular el glucómetro con Glucolog Web

- Iniciar sesión en Glucolog Web.
- Abrir el desplegable de la "Configuración" en la barra de opciones y seleccionar "Dispositivos".
- Seleccionamos "Añadir accesorio", y en la nueva ventana añadimos las opciones siguientes:
  - TIPO: Glucómetro.
  - MODELO: Nuestro modelo de medidor.
  - CÓDIGO: Introducimos el número de serie que encontraremos en la etiqueta de la parte trasera del medidor.
- Seleccionamos "Confirmar".



### Descarga de resultados por cable **Usb**

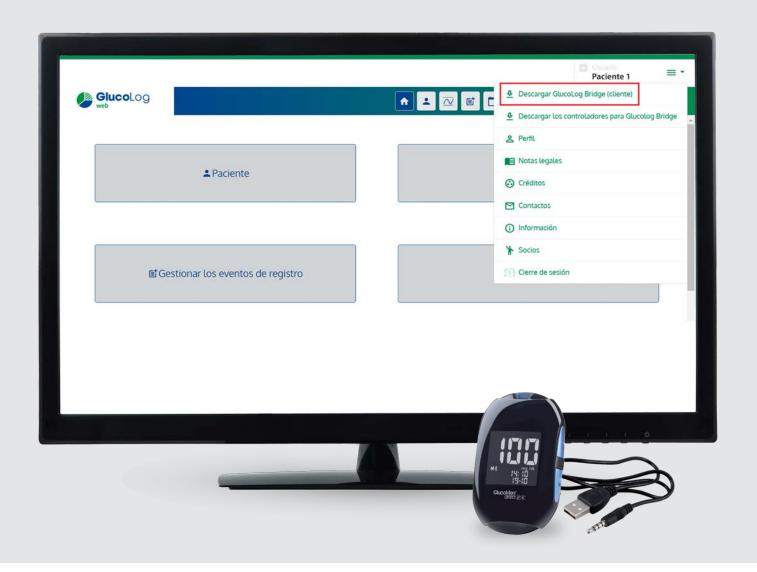

### **Obtener Glucolog Bridge**

- Iniciar sesión en Glucolog Web.
- Abrir la pestaña de opciones de la esquina superior derecha y seleccionar "Descargar Glucolog Bridge (clientes)".
- Cuando el archivo haya terminado de descargarse, hacemos doble click sobre el mismo y en la ventana emergente seleccionamos "Ejecutar".


- 2. Escoja la carpeta donde lo quiere guardar y, desde ahí, entre a la carpeta y haga doble clic en "CP210xVCPInstaller\_x64".
- 3. En la ventana emergente, debe seleccionar Siguiente > Acepto este contrato > Siguiente > Finalizar.
- 4. Glucolog Bridge ya reconocerá su glucómetro. De lo contrario, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

<sup>\*</sup> En caso de que Glucolog Bridge no reconociera su glucómetro, puede descargar los "controladores para Glucolog Bridge" desde el mismo menú que el programa:

<sup>1.</sup> Una vez descargado, busque en la carpeta "Descargas" de su ordenador una carpeta comprimida llamada "CP210x\_Windows\_Drivers", apriete el botón derecho y escoja la opción "Extraer".



### Descarga de resultados por cable **Usb**

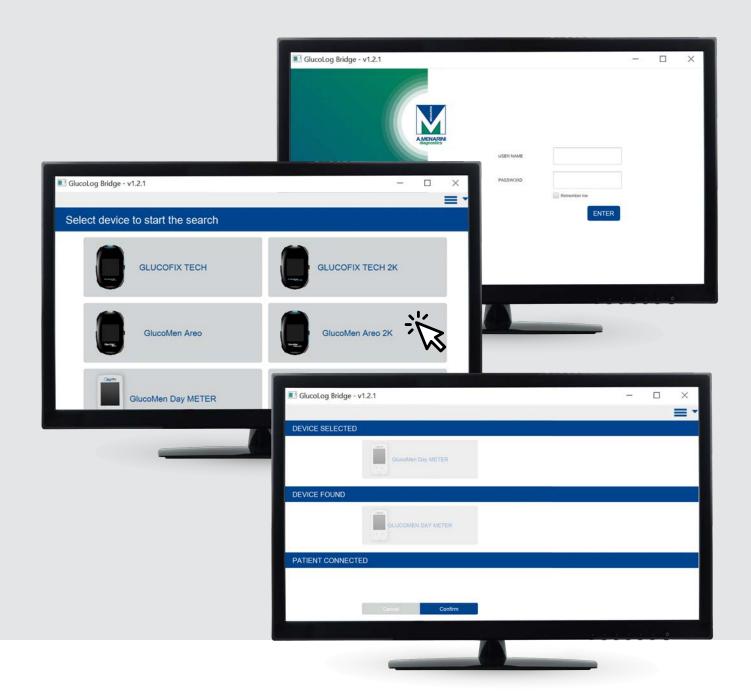

### Realizar la descarga

- Entrar con el mismo usuario y contraseña que Glucolog Web.
- Conectar cable USB al glucómetro y seleccionar el modelo de medidor.
- Esperar a que lea el dispositivo y seleccionar "Confirmar" si el nombre de paciente conectado es correcto.



### www.glucologweb.com

